



MANUALE DI ISTRUZIONI

SGABELLO PER VASCA DA BAGNO 2 FUNZIONI IN 1 - ALLUMINIO



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Made in Taiwan





INTRODUZIONE

Il presente manuale d'uso contiene le istruzioni per un corretto uso del dispositivo e dei consigli per la sicurezza nell'utilizzo. Le istruzioni per l'uso in esso contenute si applicano allo sgabello per vasca da bagno in alluminio – 2 funzioni in 1 della linea PMN HOMECARE.

Codice articolo	Descrizione
PX16236	SGABELLO PER VASCA DA BAGNO – 2 FUNZIONI IN 1 - ALLUMINIO

DESCRIZIONE

Lo sgabello per vasca da bagno viene utilizzato quale ausilio per l'igiene di persone con difficoltà nel movimento o limiti nell'autonomia funzionale.

Lo sgabello per vasca da bagno PX16236 ha una struttura in alluminio anodizzato e piano di appoggio - seduta in polietilene con fori per il deflusso dell'acqua.

Le gambe di appoggio in alluminio sono regolabili in altezza su tre livelli da cm. 21 a cm.26 e sono dotate di puntali di appoggio in gomma antiscivolo. Lo sgabello ha la funzione di agevolare l'ingresso o la seduta all'interno della vasca da bagno.

DIMENSIONI – PORTATA MASSIMA

Dimensioni piano di appoggio – seduta : cm. 41 x 23

Altezza : regolabile da cm. 21 a cm. 26 (3 livelli)

Portata max : kg. 120

ASSEMBLAGGIO E INDICAZIONI DI UTILIZZO

Lo sgabello per vasca da bagno 2 funzioni in 1 viene venduto in scatola di cartone ed è pronto per l'uso.

Qualora il prodotto presenti anomalie, rivolgersi immediatamente al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto.

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Lo sgabello per vasca da bagno può essere regolato in altezza su tre diversi livelli mediante le clips delle quali sono dotate le quattro gambe. Assicurarsi che le spine delle clips siano penetrate fino in fondo nei fori di regolazione e che le quattro gambe siano regolate alla stessa altezza.

PULIZIA

Pulire regolarmente il telaio e la seduta usando un panno morbido con detergenti neutri, non utilizzare sostanze acide o solventi e spugne abrasive. Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

AVVERTENZE

Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose. Si raccomanda di controllare periodicamente la robustezza del sedile e l'eventuale stato di usura del sedile e dei puntali.

Per evitare eventuali rischi si consiglia di tenere l'ausilio lontano dalla portata dei bambini.

PRAXIS MEDICAL NETWORK S.r.l.s. declina qualsiasi responsabilità per l'eventuale uso improprio.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente (Direttiva 2002/96/CE) in materia di tutela ambientale. Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. Non disperdere nell'ambiente.



GARANZIA

Durata della garanzia: 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto
- Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire gli articoli risultanti al controllo con difetti di fabbricazione o dei materiali usati, senza alcun addebito per le parti sostituite
- La garanzia viene concessa solo se il dispositivo è completo di tutti gli accessori, del Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte, dello scontrino fiscale e/o fattura di acquisto. In mancanza di tali requisiti la riparazione non è coperta da garanzia, risultando pertanto soggetta all'addebito delle spese di riparazione (parti sostituite e mano d'opera)
- La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio del dispositivo (leggere attentamente le istruzioni per l'uso)

ESCLUSIONI

La garanzia non comprende :

- Riparazioni e danni conseguenti ad intervento da parte di personale non autorizzato dalla PRAXIS MEDICAL NETWORK S.R.L.S.
- Danni legati ad uso improprio, abusi ed alterazioni, cadute ed atti vandalici
- Manutenzione periodica
- Spese assicurative per il rischio associato al prodotto
- Spese di trasporto presso il centro di assistenza
Qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione e/o sostituzione effettuato durante il periodo di garanzia non prolunga, rinnova o modifica la durata della stessa, che rimane nei termini indicati sopra.

Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997

Attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici

Immissione in commercio e messa in servizio dei "Dispositivi Medici" recanti la marcatura CE (Art.16 e valutati ai sensi dell'Art.11)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI PRODOTTO DEL DISPOSITIVO DI CLASSE I SGABELLO PER VASCA DA BAGNO – DUE FUNZIONI IN 1 - ALLUMINIO

(NELLE VERSIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE)

- I dispositivi in oggetto sono considerati appartenente alla classe I in base alla regola 5 dell'All. IX della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
- I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA
- I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE
- I dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE

La presente dichiarazione di conformità viene emessa da:

PRAXIS MEDICAL NETWORK S.R.L.S.

Via Riccardo Grazioli Lante 60

00195 ROMA – Italia

Tel. (+39) 06 3751 5696 • Fax (+39) 06 3735 1362

www.praxismedicalnetwork.com • info@praxismedicalnetwork.com

Partita IVA 13799631000 • Codice Fiscale 13799631000

Reg.Imprese 13799631000 • C.C.I.A.A. ROMA RM – 1473693



CERTIFICATO DI GARANZIA

(Spazio da compilare a cura dell'acquirente)

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

_____ C.a.p. _____

Città _____ Prov. _____

Ai sensi del D. Lgs 196/03 i dati personali vengono raccolti ai fini di usufruire della garanzia del prodotto secondo quanto indicato nelle condizioni di garanzia. Tali dati non verranno diffusi.

Il titolare del trattamento dei dati è il rivenditore indicato in calce.

Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati sul presente certificato di garanzia.

Firma _____



(Spazio da compilare a cura del rivenditore)

Prodotto _____

Data di acquisto _____

Rivenditore (timbro e firma)