



MANUALE DI ISTRUZIONI

TRIPODE / QUADRIPODE PER DEAMBULAZIONE REGOLABILE IN ALTEZZA IN ALLUMINIO SERIE DE LUXE



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Made in Taiwan



INTRODUZIONE

Il presente manuale d'uso contiene le istruzioni per un corretto uso del dispositivo e dei consigli per la sicurezza nell'utilizzo. Le istruzioni per l'uso in esso contenute si applicano a tripodi e quadripodi per deambulazione – serie De Luxe - dotati di base larga o stretta e regolabili in altezza della linea PMN REHAB.

Codice articolo	Descrizione
PX18126	TRIPODE PER DEAMBULAZIONE IN ALLUMINIO - REGOLABILE IN ALTEZZA SERIE DE LUXE
PX18127	QUADRIPODE PER DEAMBULAZIONE IN ALLUMINIO - REGOLABILE IN ALTEZZA SERIE DE LUXE
PX18128	TRIPODE PER DEAMBULAZIONE IN ALLUMINIO - REGOLABILE IN ALTEZZA BASE STRETTA - SERIE DE LUXE
PX18129	QUADRIPODE PER DEAMBULAZIONE IN ALLUMINIO - REGOLABILE IN ALTEZZA BASE STRETTA - SERIE DE LUXE
PX18130	QUADRIPODE PER DEAMBULAZIONE IN ALLUMINIO - REGOLABILE IN ALTEZZA BASE STRETTA

DESCRIZIONE

I tripodi e quadripodi per deambulazione in alluminio regolabili in altezza sono dotati di un'impugnatura ergonomica realizzata in polipropilene, una parte superiore realizzata in alluminio, una parte inferiore con relativa base d'appoggio in acciaio e sono dotati di puntali in gomma antiscivolo per garantire la massima sicurezza.

DIMENSIONI DELLE BASI

Il tripode per deambulazione in alluminio PX18126 è dotato di una base di cm. 38x31x31 .

Il quadripode per deambulazione in alluminio PX18127 è dotato di una base di cm. 38x23x26x23 .

Il tripode per deambulazione in alluminio con base stretta PX18128 è dotato di una base di cm. 16,5x14x14 .

Il quadripode per deambulazione in alluminio con base stretta PX18129 è dotato di una base di cm. 13x13x13x13 .

Il quadripode per deambulazione in alluminio con base stretta PX18130 è dotato di una base di cm. 15,5x21,5

ASSEMBLAGGIO E INDICAZIONI DI UTILIZZO

I tripodi e quadripodi per deambulazione vengono venduti già pronti per l'utilizzo.

Qualora il prodotto presenti anomalie, rivolgersi immediatamente al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Non sono quindi necessari altri aggiustamenti se non quelli relativi all'altezza dell'utilizzatore.

Il tripode PX18126 ed il quadripode PX18127 sono regolabili in altezza ogni 2,5 cm. (min cm.74 - max cm.99)

Il tripode PX18128 ed il quadripode PX18129 sono regolabili in altezza ogni 2,5 cm. (min cm.69 - max cm.94)

Il quadripode PX18130 è regolabile in altezza ogni 2,5 cm. (min cm.74 - max cm.96)

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

La regolazione deve essere effettuata in base alla statura del paziente, dal comfort e dalla manovrabilità soggettiva del paziente stesso.

Essa è regolata da un pulsante da portare in corrispondenza dei fori desiderati.

Assicurarsi che la spina del pulsante sia penetrata completamente nel foro.

PULIZIA

Pulire regolarmente l'impugnatura con sapone neutro, non utilizzare alcool o solventi.

AVVERTENZE

Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose. Si raccomanda di evitare contatti prolungati con acqua e di controllare periodicamente la robustezza del tripode o del quadripode. Per evitare eventuali rischi si consiglia di tenere l'ausilio lontano dalla portata dei bambini e di sostituire i puntali d'appoggio a terra una volta usurati.

La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l'eventuale uso improprio.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente (Direttiva 2002/96/CE) in materia di tutela ambientale. Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. Non disperdere nell'ambiente.



GARANZIA

Durata della garanzia: 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto
- Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire gli articoli risultanti al controllo con difetti di fabbricazione o dei materiali usati, senza alcun addebito per le parti sostituite
- La garanzia viene concessa solo se il dispositivo è completo di tutti gli accessori, del Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte, dello scontrino fiscale e/o fattura di acquisto. In mancanza di tali requisiti la riparazione non è coperta da garanzia, risultando pertanto soggetta all'addebito delle spese di riparazione (parti sostituite e mano d'opera)
- La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio del dispositivo (leggere attentamente le istruzioni per l'uso)

ESCLUSIONI

La garanzia non comprende :

- Riparazioni e danni conseguenti ad intervento da parte di personale non autorizzato dalla S.F.O. Srl
- Danni legati ad uso improprio, abusi ed alterazioni, cadute ed atti vandalici
- Manutenzione periodica
- Spese assicurative per il rischio associato al prodotto
- Spese di trasporto presso il centro di assistenza
Qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione e/o sostituzione effettuato durante il periodo di garanzia non prolunga, rinnova o modifica la durata della stessa, che rimane nei termini indicati sopra.

Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997

Attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici

Immissione in commercio e messa in servizio dei "Dispositivi Medici" recanti la marcatura CE (Art.16 e valutati ai sensi dell'Art.11)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI PRODOTTO DEL DISPOSITIVO DI CLASSE I TRIPODI E QUADRIPODI IN ALLUMINIO REGOLABILI IN ALTEZZA

(NELLE VERSIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE)

- I dispositivi in oggetto sono considerati appartenente alla classe I in base alla regola 5 dell'All. IX della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
- I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA
- I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE
- I dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE

La presente dichiarazione di conformità viene emessa da:

SOCIETA' FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.

Viale delle Milizie 32

00192 ROMA – Italy

Tel. (+39) 06 3751 5696 • Fax (+39) 06 3735 1362

www.sfoitalia.com • info@sfoitalia.com

Partita IVA 00879611002 • Codice Fiscale 00397400581

Reg.Imprese 00397400581 • C.C.I.A.A. ROMA 197618/56



CERTIFICATO DI GARANZIA

(Spazio da compilare a cura dell'acquirente)

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

_____ C.a.p. _____

Città _____ Prov. _____


Ai sensi del D. Lgs 196/03 i dati personali vengono raccolti ai fini di usufruire della garanzia del prodotto secondo quanto indicato nelle condizioni di garanzia. Tali dati non verranno diffusi.

Il titolare del trattamento dei dati è il rivenditore indicato in calce.

Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati sul presente certificato di garanzia.

Firma _____

(Spazio da compilare a cura del rivenditore)

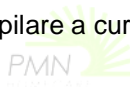

Prodotto _____

Data di acquisto _____

Rivenditore (timbro e firma)